

PIN

Pour changer votre numéro d'identification personnel, ou le PIN :

1. Accédez à : bouton Menu (☰) > Réglages > Généraux > PIN.
2. Saisissez votre PIN actuel.
3. Saisissez le nouveau PIN à quatre chiffres.

Conseil : Appuyez sur l'icône œil pour afficher ou masquer le PIN.

4. Appuyez sur le bouton Terminé pour accepter le PIN.
5. Entrez à nouveau le nouveau PIN, puis appuyez sur Terminé.

Remarque : Pour changer votre PIN, vous devez avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Remarque : Pour tout problème avec votre PIN, appelez le Service clients. Pour obtenir des informations sur les coordonnées, consultez la carte du Service clients au début de ce *Guide de l'utilisateur*.

Modification de l'heure

Attention : ÉVITEZ de désactiver le fuseau horaire automatique sur le contrôleur. Si vous désactivez la fonction Fuseau horaire automatique, votre contrôleur ne pourra pas détecter si le fuseau horaire de votre dispositif et celui de l'administration d'insuline ne correspondent pas. L'administration d'insuline en fonction d'un fuseau horaire différent de l'heure locale peut entraîner des erreurs dans l'administration de l'insuline et dans l'enregistrement des données, ce qui peut entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

Une modification de l'heure se produit lorsque vous voyagez vers un fuseau horaire différent ou pour l'heure d'été. Pour vous aider à gérer les changements d'heure, le fuseau horaire de votre appareil est distinct du fuseau horaire de l'administration d'insuline, tel que présenté dans le tableau ci-dessous.

Application Omnipod 5 sur :	Fuseau horaire du dispositif	Fuseau horaire pour l'administration de l'insuline	Réglage automatique du fuseau horaire : activé/désactivé
Contrôleur	Heure affichée sur votre contrôleur (barre d'état, écran de verrouillage)	Heure indiquée dans l'application Omnipod 5, l'administration d'insuline est basée sur l'heure de l'application.	Activé recommandé

Fuseau horaire du dispositif

Le fuseau horaire de votre dispositif correspond à l'heure affichée en dehors de l'application Omnipod 5 sur la barre d'état et l'écran de verrouillage. L'heure de votre dispositif se met automatiquement à jour lorsque vous voyagez vers un nouveau

fuseau horaire ou pour l'heure d'été si le réglage Fuseau horaire automatique est activé. Il est recommandé de conserver le réglage Fuseau horaire automatique sur activé afin que le fuseau horaire de votre appareil corresponde toujours à votre fuseau horaire local.

Pour activer ou désactiver le fuseau horaire automatique :

1. Accédez à : bouton Menu (☰) > Réglages > Généraux > Fuseau horaire.
2. Si vous avez un Pod actif, appuyez sur **METTRE EN PAUSE L'ADMINISTRATION D'INSULINE**, puis sur **OUI**.
3. Appuyez sur **Fuseau horaire automatique** du dispositif. Appuyez sur **CONTINUER**.
4. Appuyez sur le bouton à bascule pour activer ou désactiver la **Détection automatique** du fuseau horaire.
Conseil : La couleur bleue signifie que le réglage est sur activé. La couleur grise signifie que le réglage est désactivé.
5. Lorsque le fuseau horaire automatique de l'appareil est désactivé, vous avez accès au fuseau horaire du contrôleur.
6. Pour modifier le fuseau horaire du contrôleur, appuyez sur **SÉLECTIONNER LE FUSEAU HORAIRE**, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste.

Fuseau horaire pour l'administration de l'insuline

Votre fuseau horaire pour l'administration d'insuline correspond à l'heure affichée dans l'application Omnipod 5 et ne change que lorsque vous le modifiez vous-même. Il s'agit du fuseau horaire sur lequel est basée votre administration d'insuline. Lorsque le réglage Fuseau horaire automatique est activé, l'application Omnipod 5 détecte lorsque le fuseau horaire de votre dispositif et le fuseau horaire d'administration de l'insuline ne correspondent pas et vous en informe. Par exemple, lorsque vous voyagez à l'extérieur du pays, votre application Omnipod 5 vous demandera si vous souhaitez mettre à jour votre fuseau horaire pour l'administration d'insuline en fonction de votre nouvelle heure locale.

Vous souhaitez peut-être modifier le fuseau horaire d'administration de votre insuline, par exemple si vous vous préparez à vous rendre dans un nouveau fuseau horaire.

Pour changer votre fuseau horaire concernant l'administration de l'insuline :

1. Dans le Mode Manuel, accédez à : bouton Menu (☰) > Réglages > Généraux > Fuseau horaire pour l'administration d'insuline
2. Si vous avez un Pod actif, appuyez sur **METTRE EN PAUSE L'ADMINISTRATION D'INSULINE**, puis sur **OUI**.
3. Sélectionnez le fuseau horaire souhaité, puis appuyez sur **ENREGISTRER**, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
4. Appuyez sur **OUI** pour redémarrer l'administration d'insuline.