

### 3.11.2.2 Date et Heure

Il est essentiel de paramétrer correctement l'heure et la date de votre PDM afin de vous assurer une administration d'insuline basale précise et de conserver un suivi exact de votre traitement d'insuline et de tout autre événement. Vous pouvez sélectionner un format horaire de 12 heures ou 24 heures. Parfois, lorsque vous aurez besoin de changer les réglages de la

date et de l'heure (par exemple, pour ajuster l'heure d'été/hivers ou après avoir réinitialisé le PDM), désactivez le Réservoir-Patch et activez un nouveau Réservoir-Patch.

**Remarque :** Par mesure de sécurité, vous pourrez modifier la date et l'heure uniquement lorsqu'il n'y a pas de Réservoir-Patch actif.


1. Accédez à l'écran Réglage date et Heure.

Menu principal → Réglages → Généralités → Date/Heure

Si vous activez le commutateur, l'heure est réglée sur un format 24 heures.



2. Clavier Date et Heure

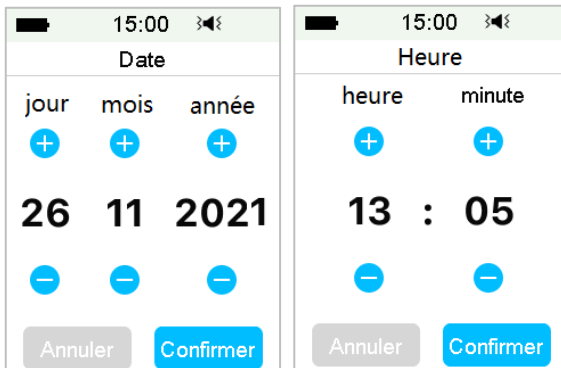

### 3.11.2.3 Options Audio (Tonalité) Audio /Vibration