

Systèmes d'exploitation nécessaires

- Appareil IOS : système IOS 12.0 ou au-dessus.
- Appareil Android : système Android 8.0 ou au-dessus.

Réglages recommandés pour votre smartphone

Consulter le mode d'emploi de votre smartphone pour apprendre à modifier ses paramètres.

Réglez les paramètres suivants pour votre application EasyPatch :

- Bluetooth : disponible et allumé.
- Les modes « Silencieux » et « Ne pas déranger » doivent être éteints.
- Volume : assez fort pour que vous entendiez les alertes et rappels.
- Internet : assurez-vous que l'application est autorisée à utiliser le WIFI et les données mobiles.
- Caméra : autorisez l'application EasyPatch à accéder à l'appareil photo.
- Notifications : activez les notifications pour l'application EasyPatch.
- Heure : ne changez pas l'heure de votre smartphone car cela pourrait modifier l'heure de l'écran d'accueil (Moniteur).
- Ne pas activer le mode économiseur de batterie, sinon, l'application cessera de télécharger les données.

- L'application EasyPatch doit rester ouverte et en cours d'exécution en arrière-plan.
- Redémarrez l'application mobile Medtrum EasyPatch après le redémarrage de votre appareil.

Si vous avez installé l'application sur un appareil IOS :

- Assurez-vous que Actualiser en arrière-plan pour EasyPatch App est activé.

Si vous avez installé l'application sur un appareil Android :

- Pour le système Android 8.0 à 11.0, assurez-vous d'autoriser l'application à accéder à « Emplacement de l'appareil » afin que l'application puisse utiliser la fonction Bluetooth
- Pour le système Android 12.0 ou version ultérieure, assurez-vous d'activer « Appareils à proximité » afin que l'application puisse utiliser la fonction Bluetooth pour connecter un autre appareil.
- Assurez-vous que l'application EasyPatch est verrouillée en arrière-plan.
- Activez l'exécuteur automatique (autorun) dans les réglages (Samsung).